

再使用禁止

ODPバンド

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者氏名: 有限会社バルビゾン
連絡先電話番号: 047-460-7818
製造業者: ジーアンドエイチワイヤーカンパニー
(G&H Wire Company, Inc.)

国名: アメリカ

【形状、構造及び原理等】

1. 原材料

ステンレス鋼

2. 形状、構造

本品には大臼歯用と小臼歯用があり、これらには歯列矯正用チューブや歯列矯正用アタッチメントのブラケットやアタッチメント等が構成品としてプリウエルドされる場合がある。

形状: 代表的な1種類を掲載する。

構造の詳細はカタログを参照のこと。



3. 原理

本品は、アタッチメントやチューブを本器に硬ろう付け又はろう付けされた後に、歯牙の形態に正確に適合させ、所定の位置へ合着し、固定するために用いる。

【使用目的又は効果】

歯科矯正用アタッチメント等を歯牙に固定するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用用途にあった種類を選択する。
2. 使用する硬ろう付けまたはろう付けする器械や材料の操作方法に従い、所定の位置へアタッチメントやチューブを硬ろう付け又はろう付けする。
3. 歯面の清掃を行った後、使用用途に適した歯科矯正用バンドセメントを材料の操作方法に従い、バンドの内部に塗布し、本品を歯面に接着する。
4. バンドプッシャーやバンドシーター等の器具を使用し、咬合面から歯頸部に向かって押し込む。
5. バンドセメントが硬化した後、ワイヤー等をスロットに挿入し、その弾性または圧力を用いて歯列の移動を行う。
6. 治療が終了したら、バンドリムービングプライヤー等の適切なインストルメントを使用し、歯牙より撤去すること。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) スポットウェルダで溶接される場合は、適切な溶接温度管理の上でウェルドすること。
- 2) 本品を試適に用いた場合は、必ず洗浄消毒後戻すこと。(滅菌が望ましい)

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
(1) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し医師の診察を受けさせること。
2. 不具合・有害事象
(1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下等を招いたり、感染症を誘発する恐れがある。
(2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症が発生することがある。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 埃、イオウ分、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれの無い場所で、外圧のかからない場所に保管して下さい。
- (2) 直射日光、高温多湿、紫外線等を避けて保管して下さい。