

アジリティーブラケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 含有金属に対し、発疹や皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 原材料


本体:ステンレス鋼 クリップ:ニッケルチタニウム ベース部:銀合金

2. 形状、構造

本品には、スロット幅が0.18インチ(0.46x0.64mm)と0.22インチ(0.56x0.71mm)の種類があり、ベースにアンカーロックベースとメッシュベースの種類がある。犬歯、小臼歯にはフックのあるタイプとないタイプがある。

形状:代表的な1種類を掲載する。

詳細はカタログを参照のこと

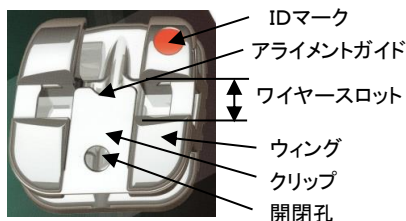

3. 原理

本品は、ステンレススチール製の歯列矯正用ブラケットであり、歯科用の接着剤を用いて歯牙に接着され、スロット部に歯列矯正用ワイヤを挿入し、矯正力を助長することで歯牙を所定方向に移動させるものである。

また、装着された歯列矯正用ワイヤは、結さつ材を用いずに組み込まれたクリップにより保持される。

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

使用用途にあった種類を選択する。

- (1) 歯面の清掃を行った後、使用用途に適した歯科用接着剤を用いて本品を歯面に接着する。

- (2) 接着剤が十分に硬化した後、クリップを開く。

クリップを開く時は、探針の先端をクリップの開閉孔に差し込むか、クリップの切端と逆部にあるアライメント・ガイドの端に当てる。

そして、切端方向に引いてクリップを図1のA又はBのように開く。

図1



A:開閉孔に探針を差し込む場合

B:アライメント・ガイドの端に探針を当てる場合

* また、1回目の「カチッ」という音は上のロックから外れる音、2回目の「カチッ」という音は完全にクリップが開いた時に聞こえる音です。

- (3) 適切な大きさのアーチワイヤを選択し、スロットに挿入後クリップを閉じます。クリップを閉じる時は、ユーティリティプライヤーやピンセット、又は図2のように、ご自分の指でブラケットの咬合面側をそっと押して下さい。

* また、閉まり始めると下のロックから外れる時に1回目の「カチッ」という音が聞こえ、その後完全に閉鎖される時に2回目の「カチッ」という音が聞こえます。



- (4) 図3のようにクリップを撤去することが可能なので、通常の結さつ線やエラストメリックスリガチャーを最終的な段階で選んで用いることが可能です。

- ①ピンセットの両方の先端を近心側と遠心側の切り込みに挿入して下さい。

図3



- ②ピンセットを切端に向かって45度回転させ、ゆっくりとクリップをゆるめて開きます。

* ワイヤを交換する際には(2)と(3)の行程を繰り返して行います。

- (5) 治療が終了したら、ブラケットリムーバー等のインスツルメントを使用し歯牙より取り外します。残留接着材は適切な方法で除去して下さい。

- (6) クリップ開閉時の注意事項

- ①クリップを開閉する際には過度の力を加えたり、歯面に対して上方にクリップを引き上げないこと。

- ②ワイヤー交換時には、クリップの開閉作業を行う前にブラケットの清掃を行うこと。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) アーチワイヤの遠心端で頬の軟組織を傷つけないため、遠心端は曲げる等して下さい。また、アーチワイヤーのずれを防止して下さい。
- 2) 接着剤の使用方法は、接着剤の取扱説明書を参照し使用して下さい。
- 3) 変形や脱落の原因となりますので、取り扱い上で過大な力を加えないで下さい。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し医師の診察を受けさせること。
- (2) 硬い物を噛むと脱落等の原因になる可能性があります。破損やエナメル質の剥離の原因にもなります。
- (3) 大部分が修復された歯牙、栓伏歯、及び先天的にエナメル質が不完全な歯牙に本品を装着するとエナメル質に損傷を与える可能性が大きくなるので使用する際には注意すること。
- (4) 本品を使用時、クリップが脱落しないよう、適切に使用されているか確認をすること。

2. 不具合・有害事象

- (1) 一度装着、使用された製品は、変形、劣化、強度低下等を招いたり、感染症を誘発する恐れがあります。
- (2) 本品の使用に伴い、発疹や皮膚炎等の過敏症が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- (1) 埃、イオウ分、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響を生ずるおそれの無い場所で、外圧のかからない場所に保管して下さい。
- (2) 直射日光、高温多湿、紫外線等を避けて保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者氏名: 有限会社バルビゾン

連絡先電話番号: 047-460-7818

製造業者: ジーアンドエイチワイヤーカンパニー

(G&H Wire Company, Inc.)

国名: アメリカ