

福祉用具の消毒・保管方法

2025年9月21日




福祉 岡山工場

目 次

- P 3. レイアウト図
- P 4. 外観及び返却口・回収庫 写真
- P 6. 洗浄室及び洗浄・消毒機器 写真及び仕様
- P 12. 消毒室及び消毒機器 写真及び仕様
- P 15. 福祉用具の保管及び消毒の方法
- P 17. 作業室 写真及び使用薬剤
- P 19. 塗装室 写真
- P 20. 製品庫及び出荷口 写真
- P 22. 福祉用具の消毒・保管・管理に関する手順
- P 23. 福祉用具の回収・消毒・点検・保管等の留意事項
- P 25. 福祉用具の洗浄・消毒作業手順一覧表
- P 26. 福祉用具の修理及び廃却基準

レイアウト図

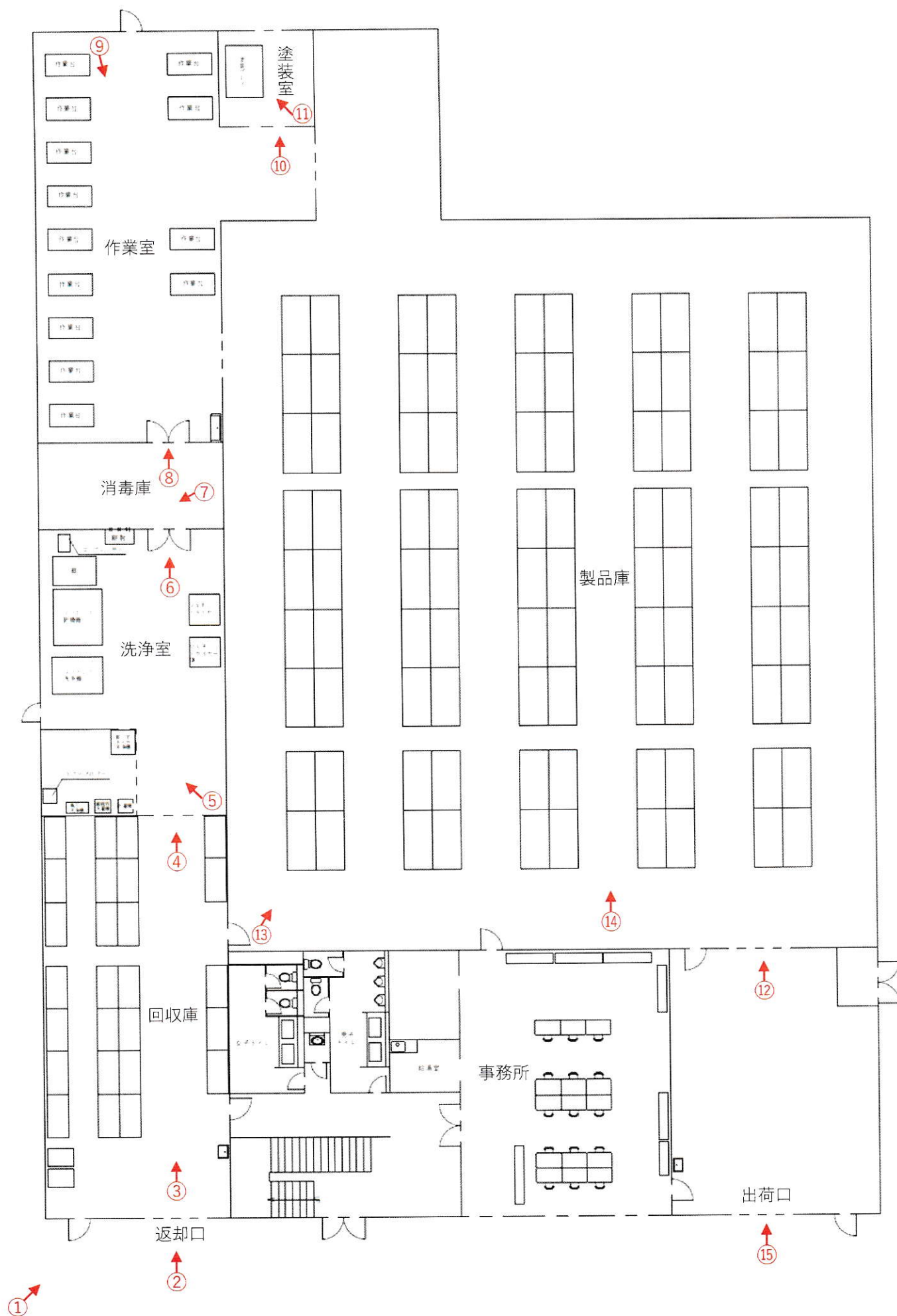

外観及び返却口・回収庫 写真

① 福祉岡山工場 外観



② 返却口



③ 回収庫




洗浄室及び洗浄・消毒機器 写真及び仕様


④ 洗浄室



⑤ 洗浄室内


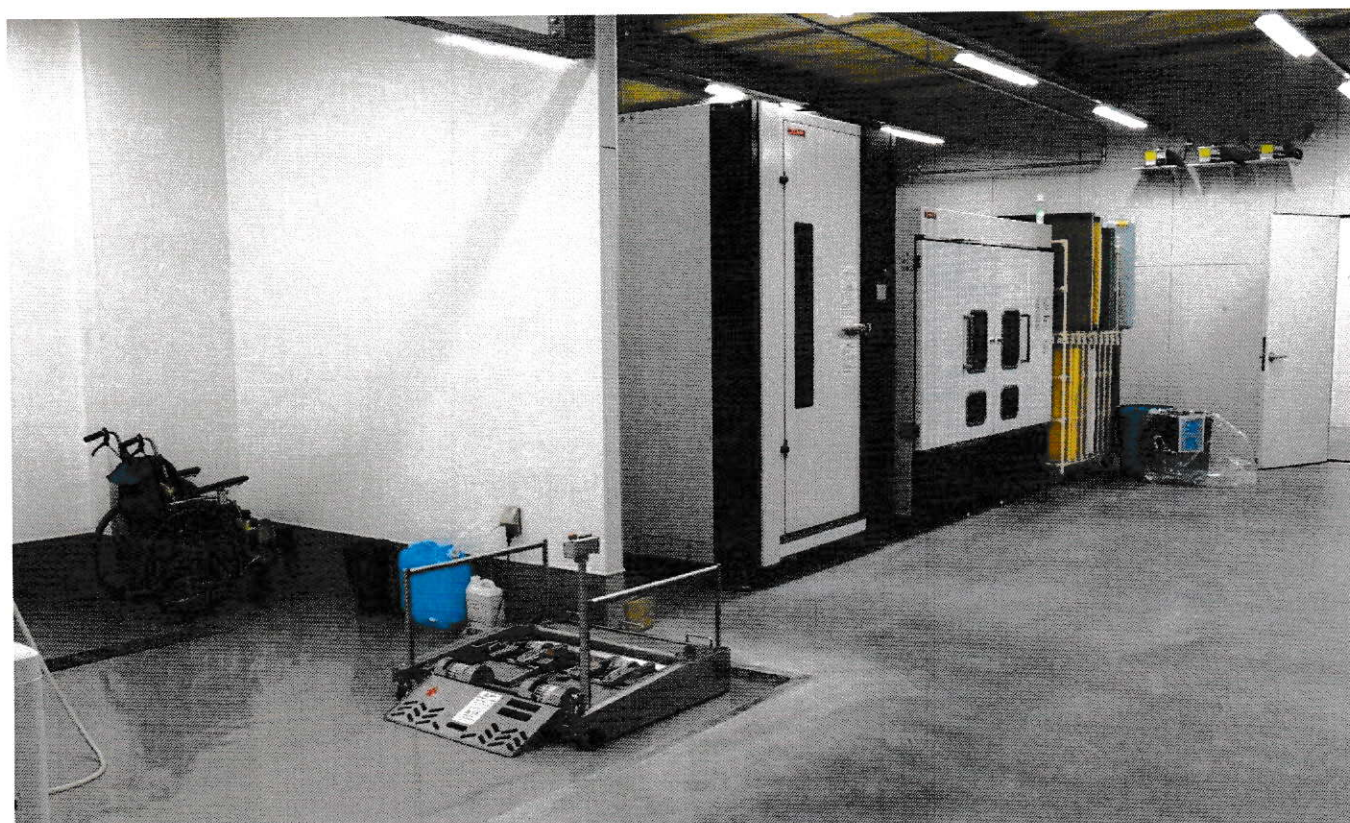


マットレス洗浄・脱水機 MRⅡ-2131SK

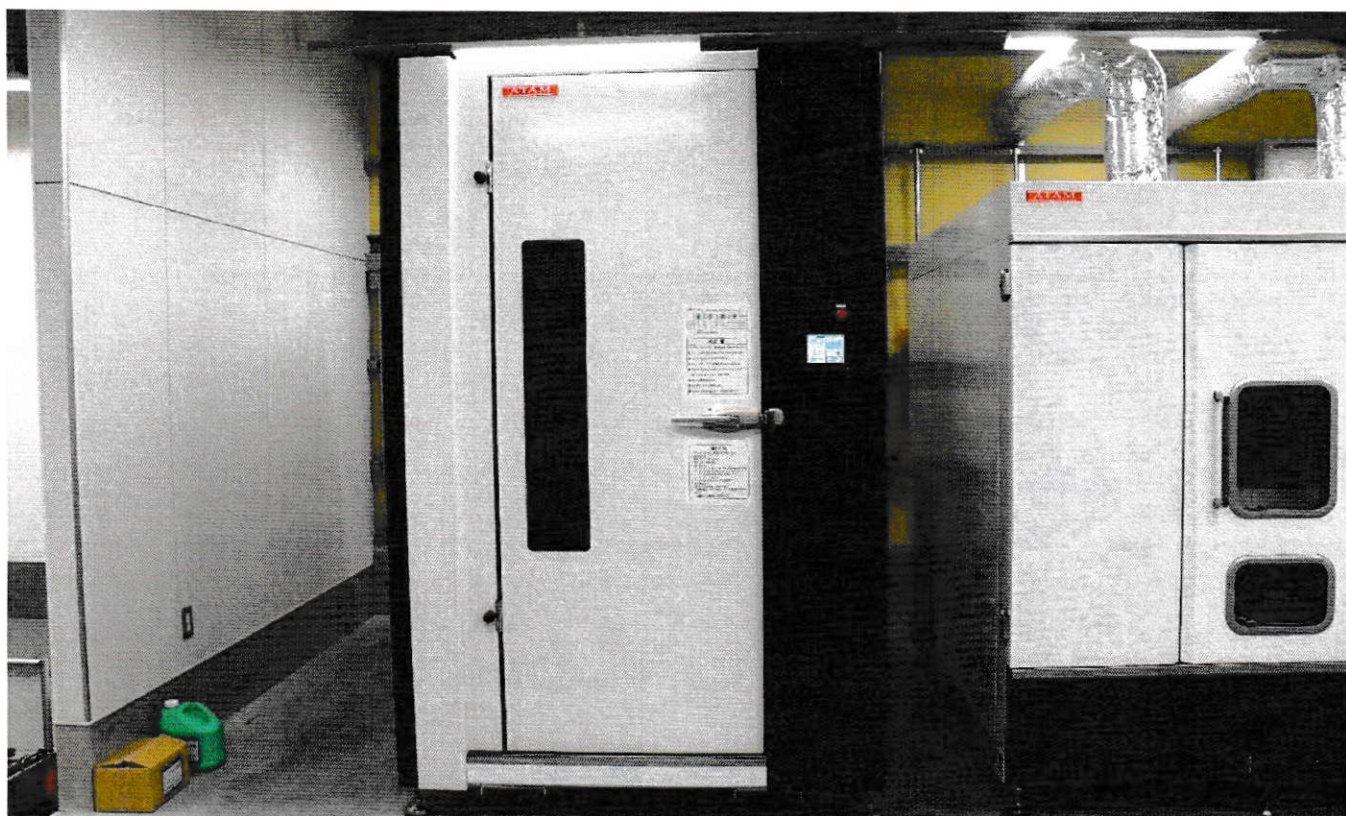

- * マットレスを平面カゴにセット後、手作業にて汚れ、シミなどの前処理可能！
- * 全自動両面吹きつけ洗浄、両面すすぎ、遠心脱水でマットレス内部の汚れも綺麗に洗浄！
- * 素材、サイズの異なるマットレス**2枚を同時に**洗浄・脱水可能！ **最速処理時間14分！**
- * 脱水スピードは高、中、低の3段階！マットレスの材質やヘタリに対応可能！

（全自動洗浄は勿論、事前に高圧洗浄機等での手動洗浄や、任意の操作で洗浄、すすぎ、脱水の時間設定が可能です！）

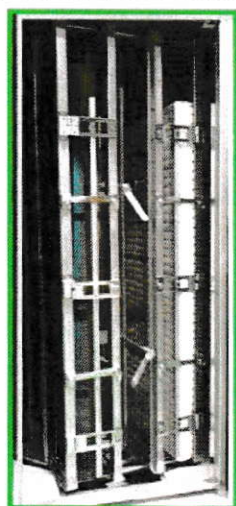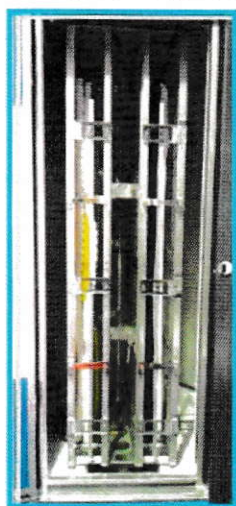

◎多様化するマットレスに対応する為、従来の厚さ70～130mmの洗浄カゴを平行に2つ装備。


◎これによりファイバー系のマットレスは勿論の事、ウレタン系のマットレス等も同時に異種類のマットレス洗浄に対応出来ます。

【ストレッチとキュウラの洗浄】

【アルファブラLとプレグラーの洗浄】

【洗浄カゴの構造】

高速マットレス乾燥機 MDⅡ-4021

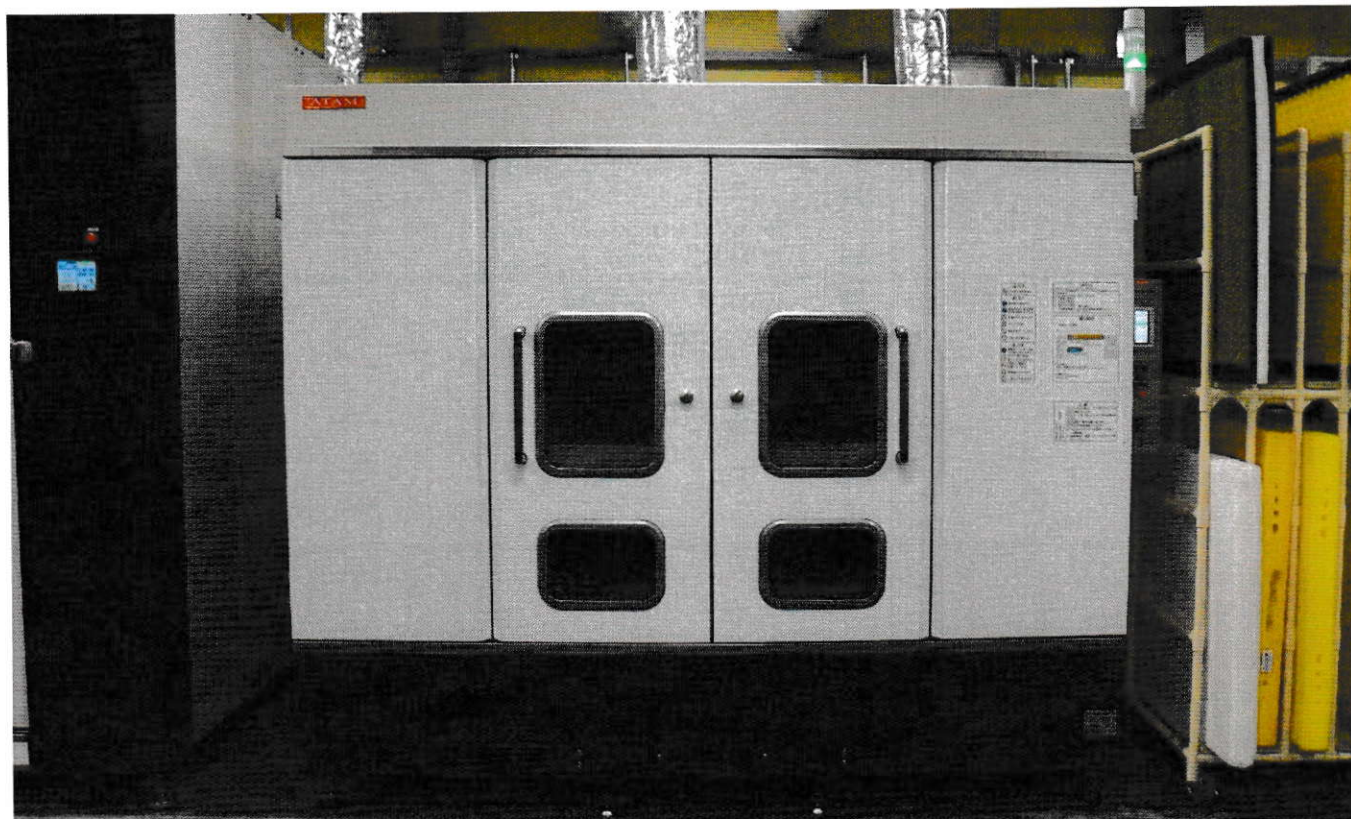

◎圧倒的な乾燥能力！


- ※ ボイラーが不要！クリーンで強力なガス熱源を自社開発！低コスト低消費電力！
- ※ 乾燥時間はファイバー系マットレス6枚（3枚×2段）なら**最速35分**！
- ※ ウォッシュブルタイプのウレタン系マットレスも高速乾燥OK！（複数枚数同時乾燥可）

（乾燥時間はマットレスの材質、構造や脱水状況等により変化します。また、クールダウンの時間は含まれていません。）

（マットレスの最大乾燥枚数は材質、構造で変化します。車いすの乾燥台数、時間は、商品の大きさ材質、構造や姿勢で変わります。）

◎マットレス中心まで確実に乾燥！ そして強力な高温湿熱消毒！

- ※ マットレスに**高温の熱風**を強制的に送り込み、表面はもちろん、中心部まで乾燥！
- ※ マットレスの中心まで短時間で**消毒効果**！（財）日本食品分析センターにて試験実施）

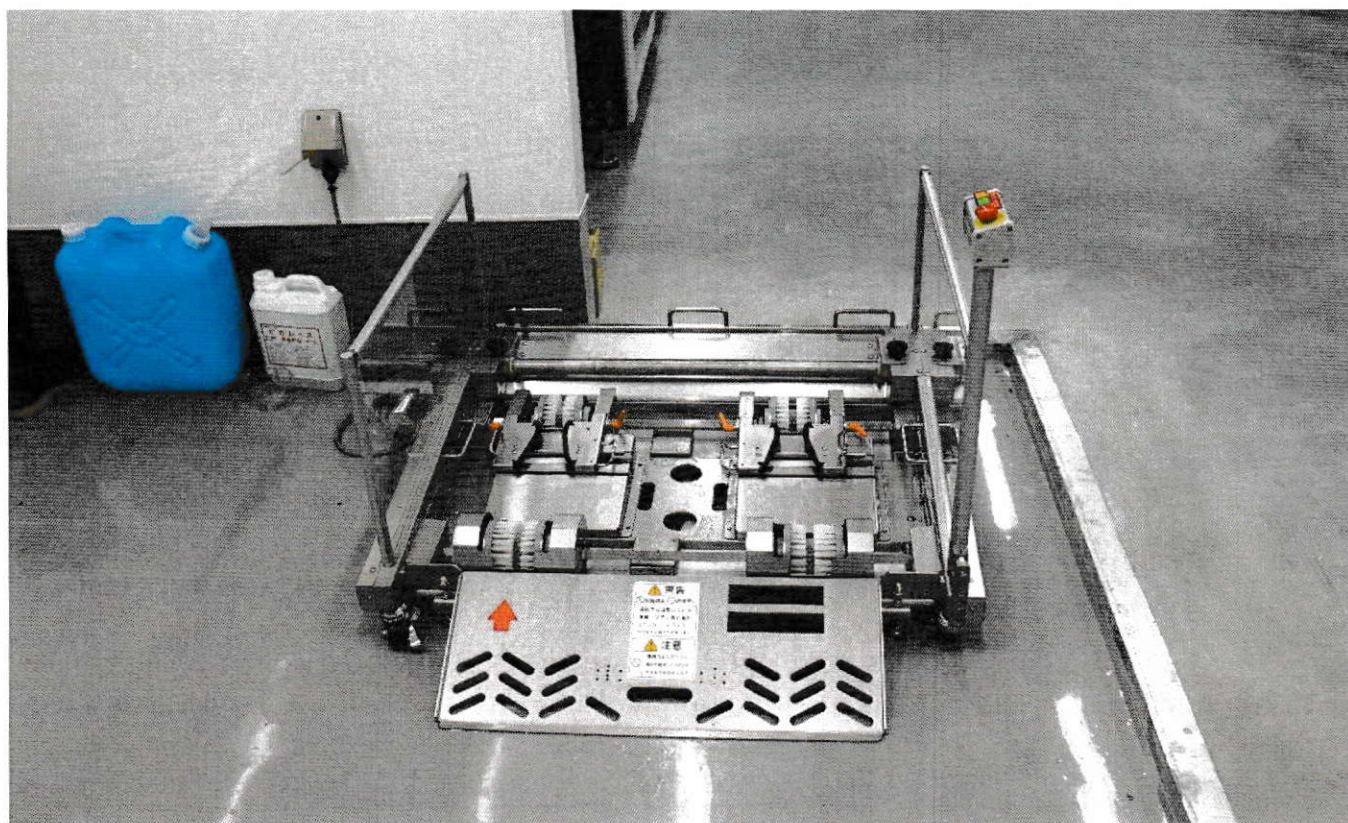


幅の狭い車いすや「ネクストコア」にも対応した「RW-031S」




ピッカー RW-031S
(写真は、オプションのピッカーキャリア含む)

新型側面ブラシは後輪が細いタイヤの側面も、特許の回転ブラシがタイヤの「側面まで」確実に、美しく洗浄可能！

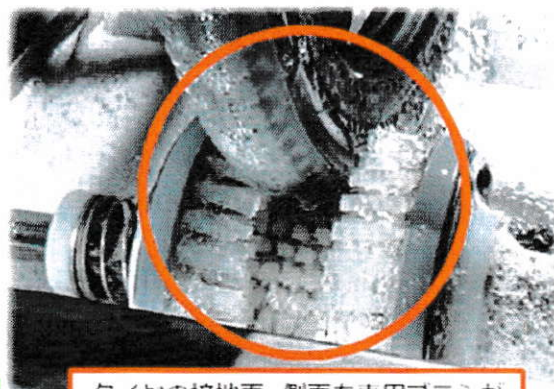


タイヤの接地面、側面も専用ブラシが挟み込んでしっかりと洗浄します。

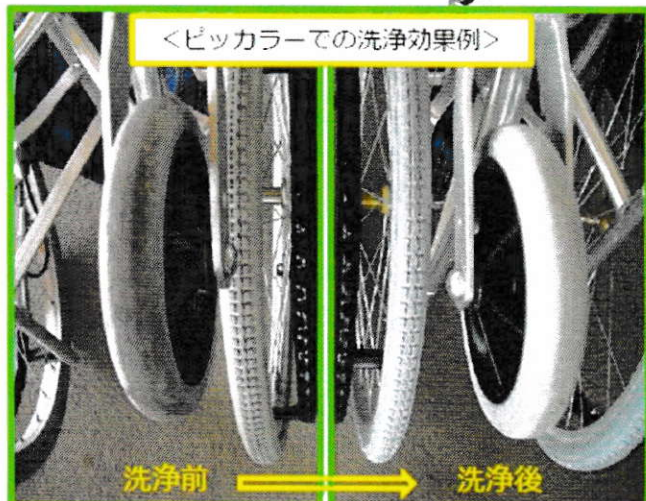

<ピッカーでの洗浄効果例>

<ピッカーRW-031Sでの車輪洗浄例>

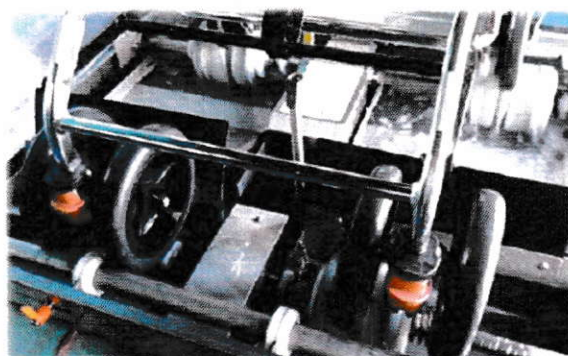

オゾン水・高温高圧洗浄機 OE-three



OE-three


電気式 オゾン水・高温水高圧洗浄機

ベッドパーツ・車椅子・歩行器・マットレス・エアーマット・スロープなどの
様々な福祉用具の洗浄・除菌に！

80℃の高温 + 7KPaの高圧洗浄で汚れ除去。オゾン水で除菌・消臭！高温水とオゾン水を同時に使用できます。

- 洗浄作業後の作業場床をオゾン水洗浄すれば清潔な環境を維持できます。（床のぬめり除去にも効果大）
- 他の消毒方法に比べ、人体に安全なオゾン水を使用。
- 最大80℃の高温水で洗浄が可能。
- 噴出量 l/min 、洗浄圧力 3 ~ 7 MPa の能力で、洗浄力は従来機の約 2 倍。
- 熱源は三相200V30A。灯油やガスを使用しないので、排気の心配がありません。

二刀流

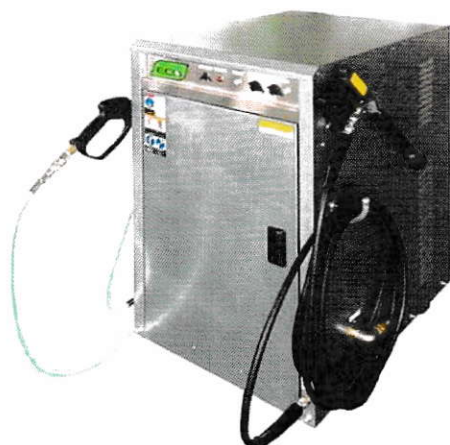

高温高圧洗浄ガン



オゾン水洗浄ガン





マルチドライヤー


電気式多目的高速乾燥機

■ 洗浄・消毒工程の中でボトルネックになりやすい乾燥工程を効率化 ■
車椅子・エアーマットレス・ベッドパーツなど多様化する介護用品の乾燥に

- 車椅子2台を25分で乾燥。
- 棚を前後に2段(付属)設置可能で、車椅子と合わせてパッドを同時に処理できます。
- 乾燥しにくいエアーマットレスも、2枚を40分で処理できます。
- 庫内に入る介護用品を処理可能。(W1,160×L1,230×H1,400mm)
- 電気式で簡単操作のため、どなたでも安心して作業できます。
- 前処理として当社エアープローアで水切りすると、乾燥時間を短縮。



ベッドパーツ

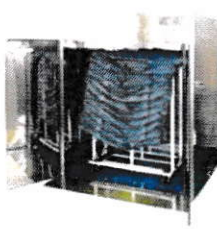

エアーマットレス




本体操作パネル

- ・衣類
- ・タオル
- ・布団、カバー類
- ・大物乾燥に

雨の日も安心。大容量！
万一の粗相に、寝具類も
ラクラク乾燥。

消毒室及び消毒機器 写真及び仕様


⑥ 消毒室

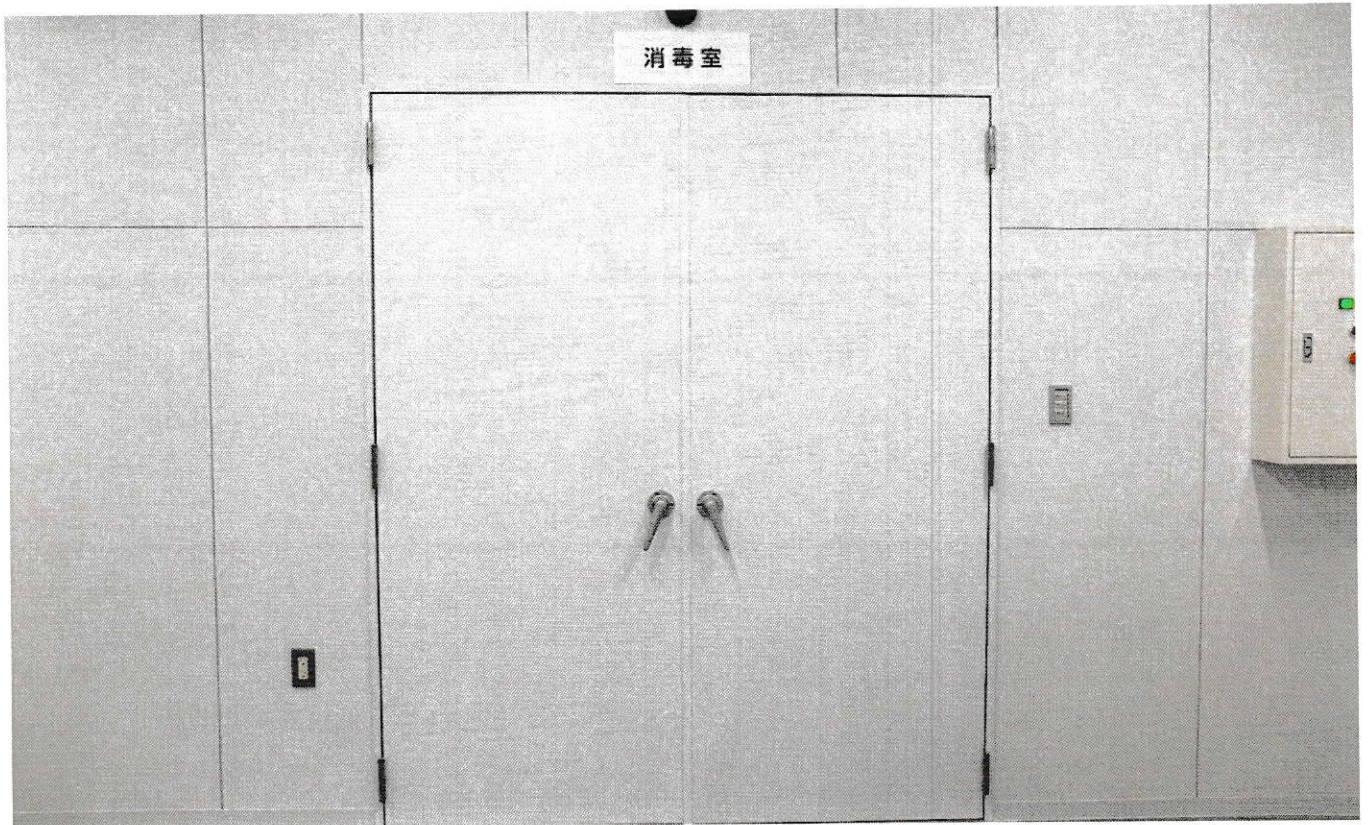

⑦ 消毒室内




オゾン発生器

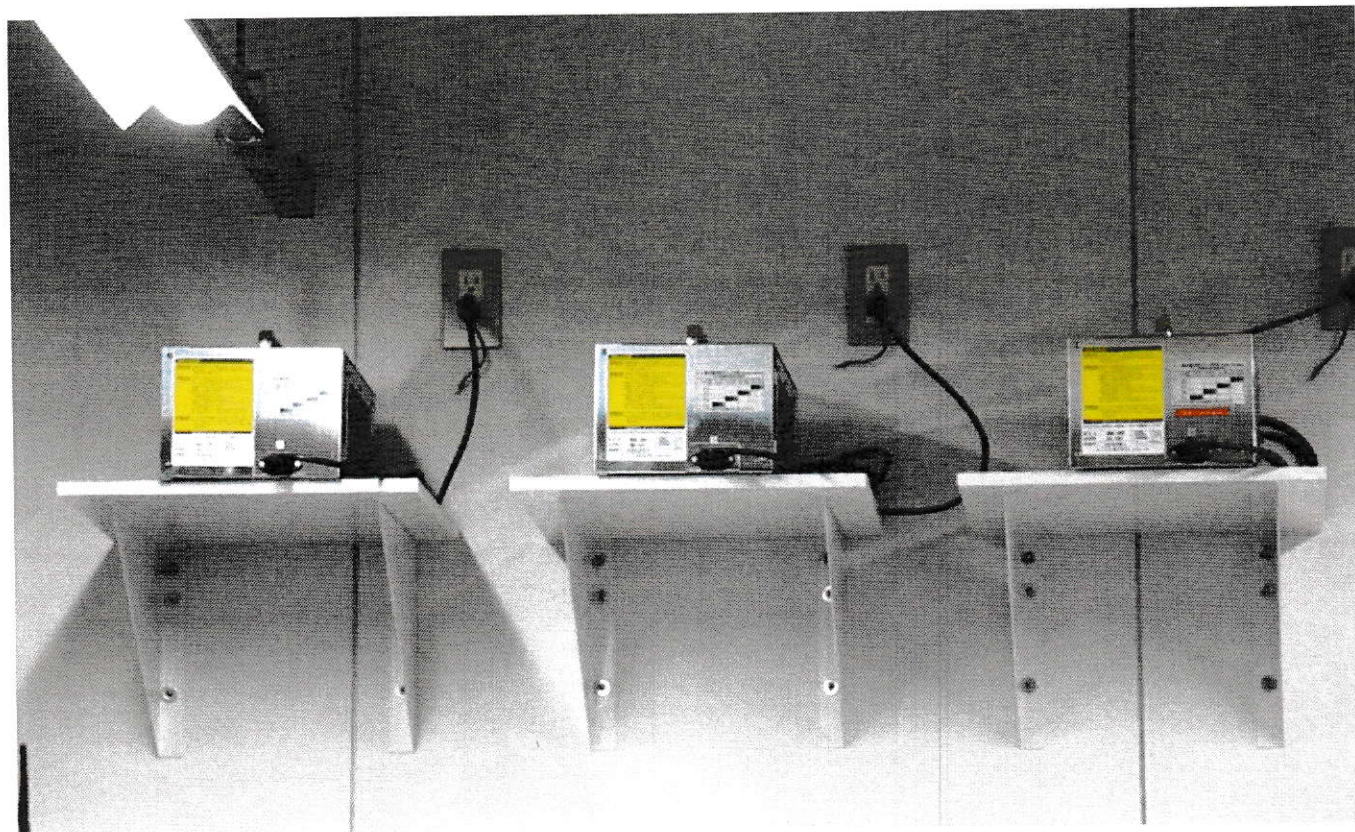

オゾンの機能と効果


オゾンとは

オゾン(O₃)という言葉聞いたことはありますか？例えば、有害な紫外線から生物を守る「オゾン層」なら、ご存知の方も多いでしょう。
オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き(脱臭・除菌)をしています。
日差しが強い海岸などでは0.03~0.06ppm、森林では0.05~0.08ppmの濃度が観測されています。
オゾンは基本的に目で確認できませんが、臭いとして確認することができます。森林などの爽やかな空気には、オゾンが含まれているのです。

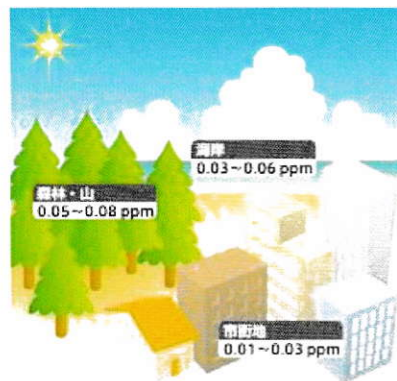

オゾンは残留毒性がありません。


オゾンは酸素(O₂)と酸素原子(O)によって構成されています。
オゾン分子(O₃)は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素(O₂)に戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

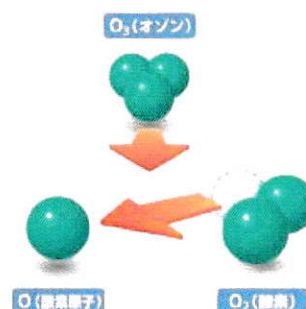

オゾン除菌・脱臭の秘密

オゾンの強い酸化力は、除菌や脱臭において、その威力を発揮します。細菌や悪臭物質の成分の多くは、酸素原子と非常に反応が速いので、オゾンによる除菌・脱臭はとても効果的なのです。

芳香剤のように、悪臭を一時的に閉じ込めるのではなく、悪臭分子を酸化分解するので、臭いが戻ることはありません。もちろん、二次公害に繋がる有害な物質を出す心配も一切ありません。オゾンは、強力な除菌・脱臭力を持ちながら、環境に限りなく優しい物質といえるでしょう。

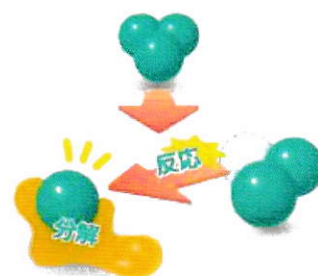

剛腕 GWD-1000T

GWD-1000T

衛生管理の決定版。オゾンパワーでみえないところまで
安心清潔！



福祉用具の保管及び消毒の方法

1. 保管

① 保管施設

- ・ 迅速で安定的な供給のために必要な保管施設を確保する。
- ・ 使用済福祉用具保管庫、消毒庫、消毒済保管庫を区分し保管する。
- ・ 使用済福祉用具と消毒済福祉用具が区分して保管できる隔壁等を設ける。
- ・ 採光あるいは照明及び換気が十分に行える構造である。

② 保管方法

- ・ 使用済福祉用具と消毒済福祉用具を区分して保管する。
- ・ 保管室内への使用後未消毒の福祉用具の持ち込みは厳禁する。
- ・ 保管室内への入室の際は手指の消毒をし、消毒済福祉用具の汚染防止に努める。

③ 保管施設の衛生

- ・ 保管施設内は毎日清掃しその清潔保持に努め必要に応じ補修を行い衛生上支障のないようにする。
- ・ 衛生上支障のないように清掃後補修内容等含めて設備管理簿に記入する。

④ 管理

- ・ 管理者は保管設備、福祉用具の保管状態を月1回以上点検し、設備管理簿及び福祉用具管理簿に記録する。

2. 消毒

① 設備内容

設 備	内 容
オゾン消毒 剛腕 1000/GWD-1000T	オゾン濃度 CT値 3,000ppm・min
オゾン水・高温高圧洗浄機 OE-three	オゾン水による除菌・消臭
サポステ	エタノール、第四アンモニウム塩による除菌 消毒
ジアクリーナー	塩酸濃度 5 % による清拭消毒

② 消毒剤の管理

- ・ 消毒剤等はそれぞれ分類して表示し、所定の保管庫に保管する。
- ・ 管理者は消毒後、消毒剤を点検し保管機器及び消毒剤管理簿に記録し管理する。

③ 管理

- ・ 消毒記録を保管機器管理簿に記録した後、福祉用具管理簿に記録する。
- ・ 管理者は月 1 回以上消毒設備を点検し設備管理簿に記録し保管する。

作業室 写真及び使用薬剤

⑧ 作業室



⑨ 作業室内



使用薬剤：トレピー君

電解次亜塩素酸水

“原料は水と塩だけ！だから、安全で安心！”
※塩などの薬品は使用していません。



除菌・消臭

細菌やウイルス・花粉 など

「トレピー君」は、「ブライター」の登録商標です。

鼻取製の
企業が誇る
二オキと菌に
有効な水

シュッと
ひと噴き！



即効 除菌・消臭ウォーター

手肌にやさしく、使用後は成分が
ただの「水」にもどります。
アルコールが効かないウイルス等
にも効果的です。

商品一覧



450ppm 20L 車載用ビニール
200ppm 20L 車載用ドラム缶



400ppm 2.5L バック



400ppm 500ml バック



200ppm 100ml
携帯用ボトル



スプレーボトル
300ml (200ml)

※詳細につきましては、お問い合わせください。
（お問い合わせ先）株式会社八木田 TEL 0527-27-5130 E: kofusa@nmdm.kk.co.jp

こんな場面でお使い頂いています！！

こんなところで！

ご家庭で



保育施設・学校



介護施設



病院



食品加工工場



アミューズメント施設



ペットショップ



こんな用途で！

消臭

ペットの消臭



生ゴミの消臭



タバコの消臭



トイレの
消臭・除菌



作業服・着ぐるみ
の消臭・除菌



汚物処理時の
消臭・除菌



お部屋の
空間除菌・消臭



除菌

インフルエンザ予防



調理器具・食器の除菌



食材の除菌洗浄



塗装室 写真

⑩ 塗装室



⑪ 塗装室内



製品庫及び出荷口 写真


⑫ 製品庫



⑬ 製品庫内




⑭ 製品庫内

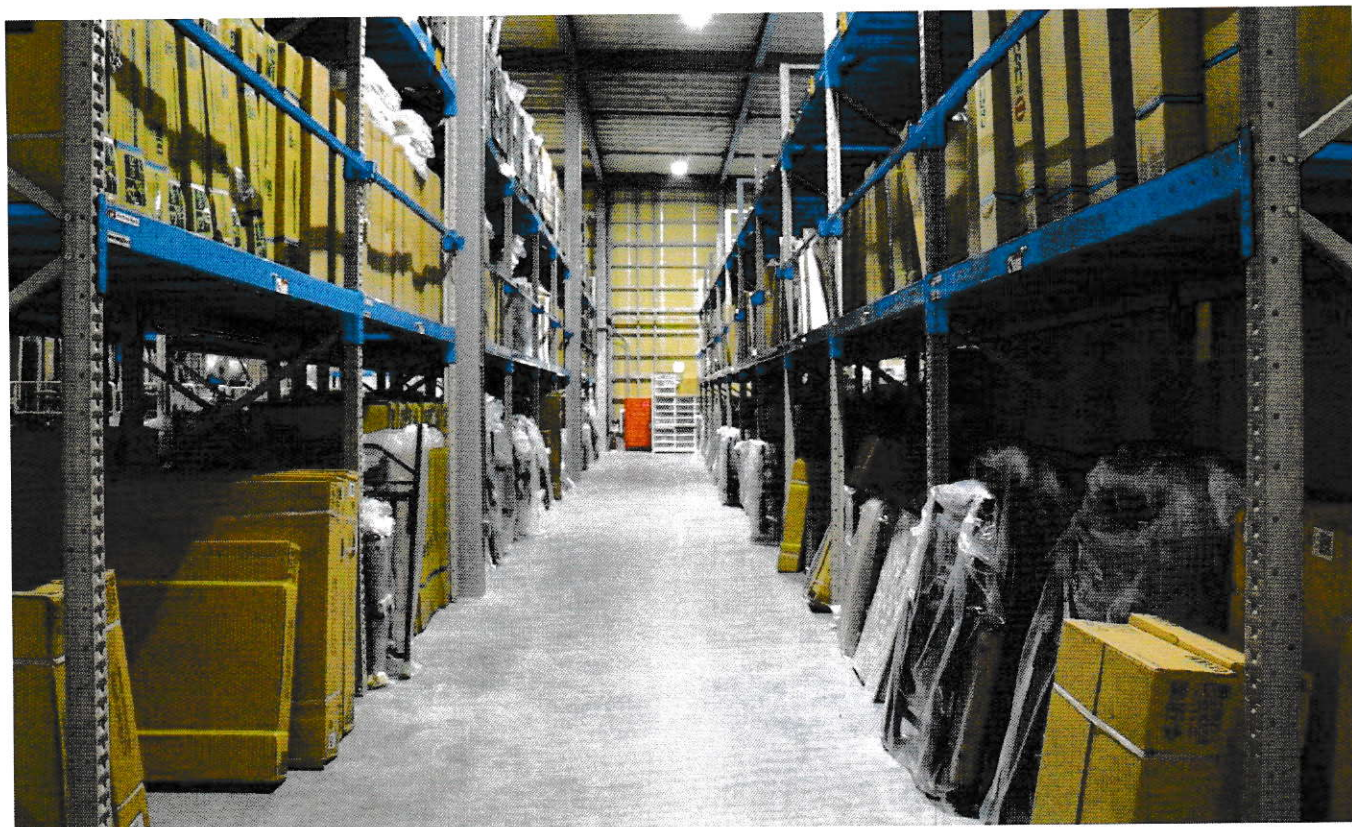

⑮ 出荷口



福祉用具の消毒・保管・管理に関する手順

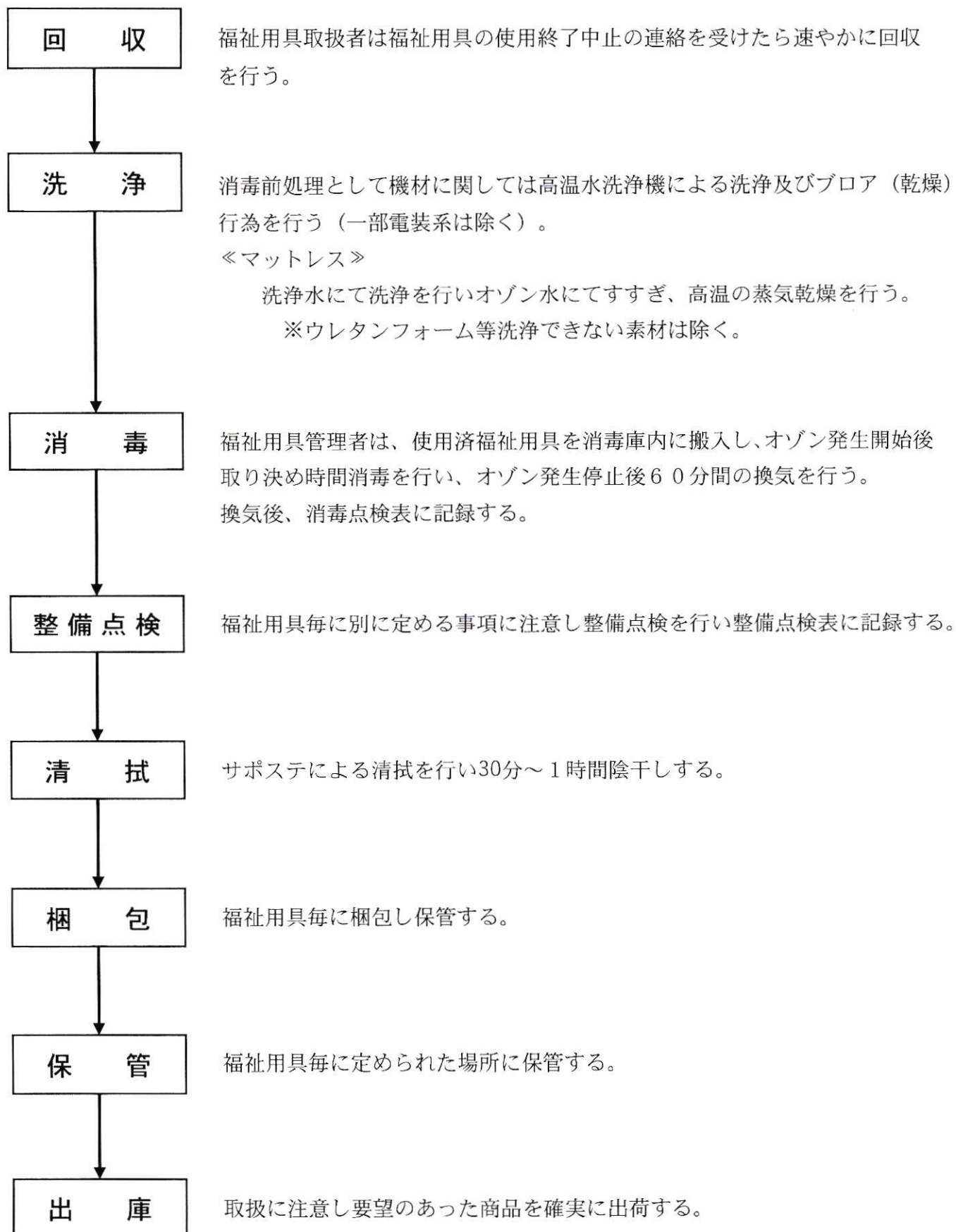

福祉用具の回収・消毒・点検・保管等の留意事項

各福祉用具は下記の点に留意する

■回収

- 利用者の希望回収日にできるだけ、添うこと。
- 利用者の家財道具等に傷をつけないように心掛ける事。
- 細かい部品等の紛失に気を付けること。
- 未使用の福祉用具と混載しないこと。

■消毒

- 消毒済の福祉用具を保管庫に移動した事を確認した後、使用済福祉用具を搬入すること。
- 換気に注意すること。
- 指先の消毒等衛生に気を付けること。

■保守点検

特殊寝台		車いす付属品 (クッション)	
駆動部	損傷 変形	本体	汚損
	手元S/Wの作用		劣化
	モーターの作動状況	カバー	シミの有無
	モーターピンの取付状態		カバーの破損
全体	外観	全体	外観
フレーム	損傷 変形	車いす付属品 (ステッキホルダー テーブル)	
	ハイローリンクの作動状態	本体	損傷 変形
ボトムセット	ボトムの損傷 変形	全体	外観
	止めフックの損傷	付属品	組立部品の有無
ベットフットボード*	ボード*の変形及び損傷	スロープ*	
付属品	組立部品 工具の有無	本体	損傷 変形
特殊寝台付属品 (マットレス除くすべて)		全体	外観
本体	損傷 変形	床ずれ防止用具	
全体	外観	ポンプ* 本体	操作S/Wの状態
特殊寝台付属品 (マットレス)			エアーの噴出状態
本体	汚損 衰損		異音
カバー	シミの有無	シート	シミ有無 破損
全体	外観	エアーマット	エアーセルの損傷及び破損
付属品	組立部品の有無		ジョイントバルブ*の損傷及び破損
車いす/電動車いす		ホース	損傷 変形
ハンドル	ゆるみ カタ	全体	外観
	切れ具合	付属品	ポンプ* フック
	レバーの効き具合	体位変換器	
ブレーキ	ワイヤーの調整具合	ポンプ* 本体	操作S/Wの状態
	タックルブレーキの効き具合		エアーの噴出状態
	タックルブレーキの損傷		異音
	タイヤの空気圧の状態	シート	シミ有無 破損
ホイール	タイヤの損傷及び磨耗	エアーマット	エアーセルの損傷及び破損
	軸受の回転状態		ジョイントバルブ*の損傷及び破損
	ハントリムの取付状態		
シート	シートの損傷	ホース	損傷 変形
カバー	シミの有無	全体	外観
シートベルト	ベルトの取付状態	付属品	ポンプ* フック
充電装置	充電作用	手すり	
バッテリー	液量	本体フレーム	損傷 変形
計器類	作用	アームレスト	損傷 変形
ホーン	作用	全体	外観
灯火類	前照灯	付属品	組立部品の有無
	方向指示器		
全体	外観		
付属品	工具/レッグレスト/充電器の有無		

■保守点検（つづき）

歩行器		リフト	
アームレスト	損傷 変形	本体フレーム	損傷 変形
本体フレーム	損傷 変形		アクチュエーターの作動
ブレーキ	ブレーキの効き具合	キャスター	取付部の状態
キャスター	取付部の状態		回転部の状態
	回転部の状態	全体	外観
全体	外観	計器類	作動
付属品	組立部品の有無	電気配線	変形及び損傷
	カゴ	バッテリー	機能
歩行補助杖		充電装置	充電作用
本体	損傷 変形	手元S/W	作用
ゴムチップ [®] 部	磨耗 劣化	付属品	取扱説明書/ボルトセット/充電器の コード [®] /開脚レバー/工具の有無
全体	外観		
ケリッパ [®] 部	劣化 汚れ		
徘徊感知器		自動排泄処理装置	
送信部	選曲S/Wの機能	本体	損傷 変形
全体	外観	電気配線	変形及び損傷
受信部	報知器の機能	センサー部	機能
	コード [®] の破損		

■保管

使用済福祉用具を保管庫内には絶対に入れないこと。
 衛生的に梱包し保管管理すること。
 指先の消毒等衛生に気をつけること。
 所定の位置に保管管理すること。

■その他

各福祉用具の衛生管理保管庫、消毒庫内の衛生管理には十分注意をすること。
 回収時は使い捨ての手袋を使うなど職員の衛生管理には十分気をつけること。

福祉用具の洗浄・消毒作業手順一覧表

製品区分	消毒箇所	洗浄					消毒	
		水洗浄	高温水洗浄	高圧水圧洗浄	高温乾燥	ブロー乾燥	オゾン消毒	サポステ清拭
特殊寝台	全体		1			2	3	4
特殊寝台付属品	マットレス以外すべて		1			2	3	4
	マットレス	1			2		3	
	マットレスカバー						1	
車いす・電動車いす	ハンドリム・握り・背もたれ・シート・アームレスト		1					2
	キャスター・ブレーキ・フットレスト・フレーム		1					2
車いす付属品	クッション						1	
	クッションカバー						1	
	ステッキホルダー		1			2	3	
スロープ	全体			1				2
床ずれ防止用具	セル						1	2
	マットレスカバー						1	
体位変換器	セル						1	2
	マットレスカバー						1	
手すり	全体	1						2
歩行器	全体	1 or 1						2
歩行補助杖	全体	1						2
移動用リフト	全体							1
入浴用リフト	全体		1			2	3	4
徘徊感知器	全体							1

注1) 洗浄・消毒一覧の番号は消毒の順序を示す。


福祉用具の修理及び廃却基準

－定義－

- 【修理】 ① 一部破損で部品交換可能な物
 ② 一部腐食、磨耗で部品交換可能な物
 ③ 一部シミ、破れで補修、洗浄により復元可能な物
- 【廃却】 ① 全体的な破損で修理不能な物
 ② 全体的な腐食、磨耗で修理不能な物
 ③ シミ、ヘタリ、破損で補修、洗浄により復元不能な物

※基準は上記の内容を番号でしめす

品目	部位	基準						備考
		修理			廃却			
		①	②	③	④	⑤	⑥	
特殊寝台	全体	○	○		○	○		
特殊寝台付属品	マットレス以外すべて	○	○		○	○		
	マットレス			○			○	
車いす 電動車いす	車いす	○	○		○	○		
	電動車いす	○	○		○	○		
車いす付属品	クッション			○			○	
	ステッキホルダー	○			○			
スロープ	全体	○			○			
床ずれ防止用具	エアーマット	○	○	○	○	○	○	
	マットレス			○			○	
体位変換器	エアーマット式	○	○	○	○	○	○	
	クッション			○			○	
手すり	全体	○	○		○	○		
歩行器	全体	○	○		○	○		
歩行補助杖	全体	○	○		○	○		
移動用リフト	全体	○	○		○	○		
入浴用リフト	全体	○	○		○	○		
徘徊感知器	全体	○			○			

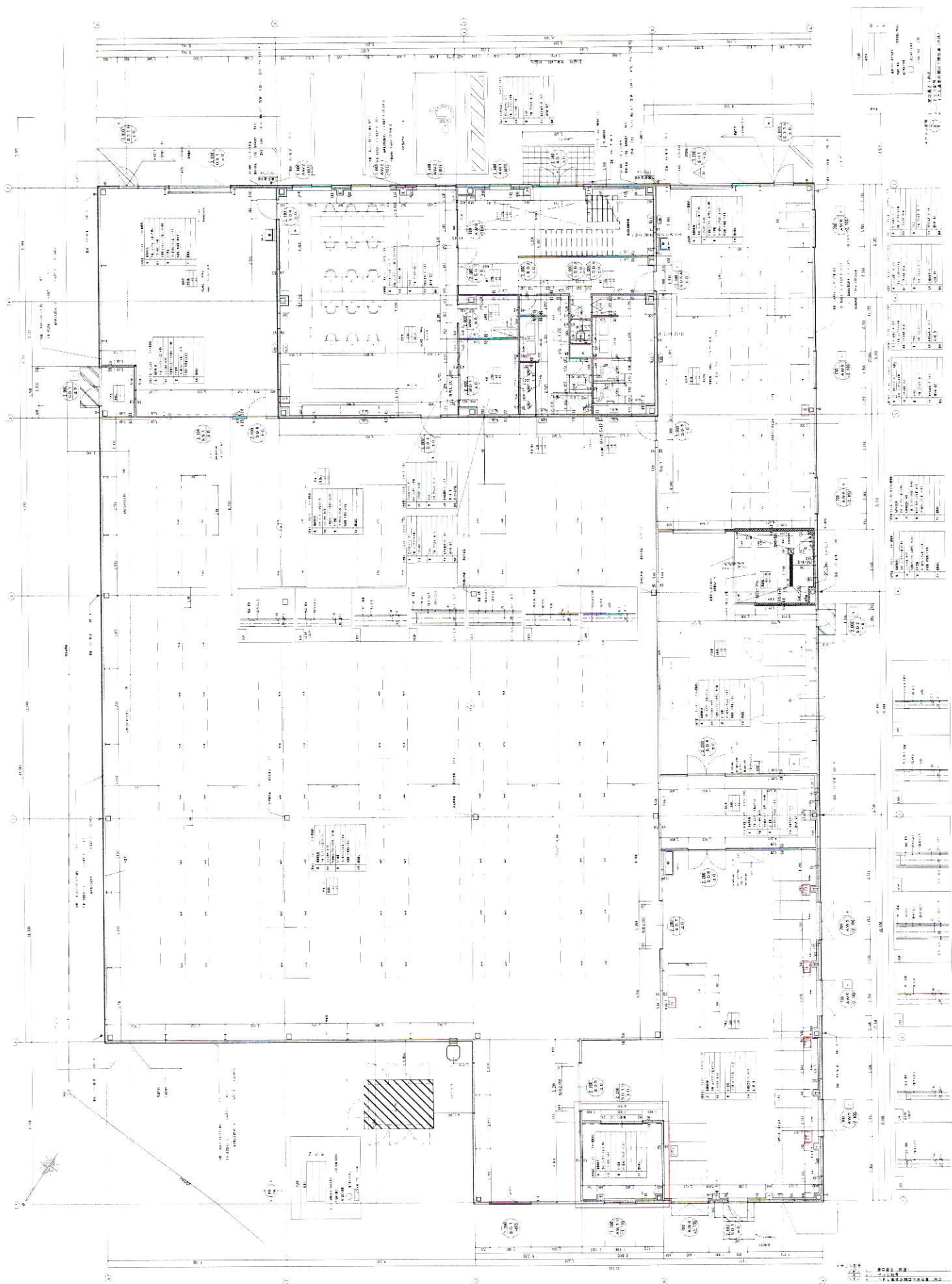

Room No.	Room Name	Area (sq. m.)
101	Room 101	12.5
102	Room 102	15.0
103	Room 103	18.0
104	Room 104	20.0
105	Room 105	22.0
106	Room 106	25.0
107	Room 107	28.0
108	Room 108	30.0
109	Room 109	32.0
110	Room 110	35.0
111	Room 111	38.0
112	Room 112	40.0
113	Room 113	42.0
114	Room 114	45.0
115	Room 115	48.0
116	Room 116	50.0
117	Room 117	52.0
118	Room 118	55.0
119	Room 119	58.0
120	Room 120	60.0
121	Room 121	62.0
122	Room 122	65.0
123	Room 123	68.0
124	Room 124	70.0
125	Room 125	72.0
126	Room 126	75.0
127	Room 127	78.0
128	Room 128	80.0
129	Room 129	82.0
130	Room 130	85.0
131	Room 131	88.0
132	Room 132	90.0
133	Room 133	92.0
134	Room 134	95.0
135	Room 135	98.0
136	Room 136	100.0
137	Room 137	102.0
138	Room 138	105.0
139	Room 139	108.0
140	Room 140	110.0
141	Room 141	112.0
142	Room 142	115.0
143	Room 143	118.0
144	Room 144	120.0
145	Room 145	122.0
146	Room 146	125.0
147	Room 147	128.0
148	Room 148	130.0
149	Room 149	132.0
150	Room 150	135.0
151	Room 151	138.0
152	Room 152	140.0
153	Room 153	142.0
154	Room 154	145.0
155	Room 155	148.0
156	Room 156	150.0
157	Room 157	152.0
158	Room 158	155.0
159	Room 159	158.0
160	Room 160	160.0
161	Room 161	162.0
162	Room 162	165.0
163	Room 163	168.0
164	Room 164	170.0
165	Room 165	172.0
166	Room 166	175.0
167	Room 167	178.0
168	Room 168	180.0
169	Room 169	182.0
170	Room 170	185.0
171	Room 171	188.0
172	Room 172	190.0
173	Room 173	192.0
174	Room 174	195.0
175	Room 175	198.0
176	Room 176	200.0
177	Room 177	202.0
178	Room 178	205.0
179	Room 179	208.0
180	Room 180	210.0
181	Room 181	212.0
182	Room 182	215.0
183	Room 183	218.0
184	Room 184	220.0
185	Room 185	222.0
186	Room 186	225.0
187	Room 187	228.0
188	Room 188	230.0
189	Room 189	232.0
190	Room 190	235.0
191	Room 191	238.0
192	Room 192	240.0
193	Room 193	242.0
194	Room 194	245.0
195	Room 195	248.0
196	Room 196	250.0
197	Room 197	252.0
198	Room 198	255.0
199	Room 199	258.0
200	Room 200	260.0
201	Room 201	262.0
202	Room 202	265.0
203	Room 203	268.0
204	Room 204	270.0
205	Room 205	272.0
206	Room 206	275.0
207	Room 207	278.0
208	Room 208	280.0
209	Room 209	282.0
210	Room 210	285.0
211	Room 211	288.0
212	Room 212	290.0
213	Room 213	292.0
214	Room 214	295.0
215	Room 215	298.0
216	Room 216	300.0
217	Room 217	302.0
218	Room 218	305.0
219	Room 219	308.0
220	Room 220	310.0
221	Room 221	312.0
222	Room 222	315.0
223	Room 223	318.0
224	Room 224	320.0
225	Room 225	322.0
226	Room 226	325.0
227	Room 227	328.0
228	Room 228	330.0
229	Room 229	332.0
230	Room 230	335.0
231	Room 231	338.0
232	Room 232	340.0
233	Room 233	342.0
234	Room 234	345.0
235	Room 235	348.0
236	Room 236	350.0
237	Room 237	352.0
238	Room 238	355.0
239	Room 239	358.0
240	Room 240	360.0
241	Room 241	362.0
242	Room 242	365.0
243	Room 243	368.0
244	Room 244	370.0
245	Room 245	372.0
246	Room 246	375.0
247	Room 247	378.0
248	Room 248	380.0
249	Room 249	382.0
250	Room 250	385.0
251	Room 251	388.0
252	Room 252	390.0
253	Room 253	392.0
254	Room 254	395.0
255	Room 255	398.0
256	Room 256	400.0
257	Room 257	402.0
258	Room 258	405.0
259	Room 259	408.0
260	Room 260	410.0
261	Room 261	412.0
262	Room 262	415.0
263	Room 263	418.0
264	Room 264	420.0
265	Room 265	422.0
266	Room 266	425.0
267	Room 267	428.0
268	Room 268	430.0
269	Room 269	432.0
270	Room 270	435.0
271	Room 271	438.0
272	Room 272	440.0
273	Room 273	442.0
274	Room 274	445.0
275	Room 275	448.0
276	Room 276	450.0
277	Room 277	452.0
278	Room 278	455.0
279	Room 279	458.0
280	Room 280	460.0
281	Room 281	462.0
282	Room 282	465.0
283	Room 283	468.0
284	Room 284	470.0
285	Room 285	472.0
286	Room 286	475.0
287	Room 287	478.0
288	Room 288	480.0
289	Room 289	482.0
290	Room 290	485.0
291	Room 291	488.0
292	Room 292	490.0
293	Room 293	492.0
294	Room 294	495.0
295	Room 295	498.0
296	Room 296	500.0
297	Room 297	502.0
298	Room 298	505.0
299	Room 299	508.0
300	Room 300	510.0
301	Room 301	512.0
302	Room 302	515.0
303	Room 303	518.0
304	Room 304	520.0
305	Room 305	522.0
306	Room 306	525.0
307	Room 307	528.0
308	Room 308	530.0
309	Room 309	532.0
310	Room 310	535.0
311	Room 311	538.0
312	Room 312	540.0
313	Room 313	542.0
314	Room 314	545.0
315	Room 315	548.0
316	Room 316	550.0
317	Room 317	552.0
318	Room 318	555.0
319	Room 319	558.0
320	Room 320	560.0
321	Room 321	562.0
322	Room 322	565.0
323	Room 323	568.0
324	Room 324	570.0
325	Room 325	572.0
326	Room 326	575.0
327	Room 327	578.0
328	Room 328	580.0
329	Room 329	582.0
330	Room 330	585.0
331	Room 331	588.0
332	Room 332	590.0
333	Room 333	592.0
334	Room 334	595.0
335	Room 335	598.0
336	Room 336	600.0
337	Room 337	602.0
338	Room 338	605.0
339	Room 339	608.0
340	Room 340	610.0
341	Room 341	612.0
342	Room 342	615.0
343	Room 343	618.0
344	Room 344	620.0
345	Room 345	622.0
346	Room 346	625.0
347	Room 347	628.0
348	Room 348	630.0
349	Room 349	632.0
350	Room 350	635.0
351	Room 351	638.0
352	Room 352	640.0
353	Room 353	642.0
354	Room 354	645.0
355	Room 355	648.0
356	Room 356	650.0
357	Room 357	652.0
358	Room 358	655.0
359	Room 359	658.0
360	Room 360	660.0
361	Room 361	662.0
362	Room 362	665.0
363	Room 363	668.0
364	Room 364	670.0
365	Room 365	672.0
366	Room 366	675.0
367	Room 367	678.0
368	Room 368	680.0
369	Room 369	682.0
370	Room 370	685.0
371	Room 371	688.0
372	Room 372	690.0
373	Room 373	692.0
374	Room 374	695.0
375	Room 375	698.0
376	Room 376	700.0
377	Room 377	702.0
378	Room 378	705.0
379	Room 379	708.0
380	Room 380	710.0
381	Room 381	712.0
382	Room 382	715.0
383	Room 383	718.0
384	Room 384	720.0
385	Room 385	722.0
386	Room 386	725.0
387	Room 387	728.0
388	Room 388	730.0
389	Room 389	732.0
390	Room 390	735.0
391	Room 391	738.0
392	Room 392	740.0
393	Room 393	742.0
394	Room 394	745.0
395	Room 395	748.0
396	Room 396	750.0
397	Room 397	752.0
398	Room 398	755.0
399	Room 399	758.0
400	Room 400	760.0
401	Room 401	762.0
402	Room 402	765.0
403	Room 403	768.0
404	Room 404	770.0
405	Room 405	772.0
406	Room 406	775.0
407	Room 407	778.0
408	Room 408	780.0
409	Room 409	782.0
410	Room 410	785.0
411	Room 411	788.0
412	Room 412	790.0
413	Room 413	792.0
414	Room 414	795.0
415	Room 415	798.0
416	Room 416	800.0
417	Room 417	802.0
418	Room 418	805.0
419	Room 419	808.0
420	Room 420	810.0
421	Room 421	812.0
422	Room 422	815.0
423	Room 423	818.0
424	Room 424	820.0
425	Room 425	822.0
426	Room 426	825.0
427	Room 427	828.0
428	Room 428	830.0
429	Room 429	832.0
430	Room 430	835.0
431	Room 431	838.0
432	Room 432	840.0
433	Room 433	842.0
434	Room 434	845.0
435	Room 435	848.0
436	Room 436	850.0
437	Room 437	852.0
438	Room 438	855.0
439	Room 439	858.0
440	Room 440	860.0
441	Room 441	862.0
442	Room 442	865.0
443	Room 443	868.0
444	Room 444	870.0
445	Room 445	872.0
446	Room 446	875.0
447	Room 447	878.0
448	Room 448	880.0
449	Room 449	882.0
450	Room 450	885.0
451	Room 451	888.0
452	Room 452	890.0
453	Room 453	892.0
454	Room 454	895.0
455	Room 455	898.0
456	Room 456	900.0
457	Room 457	902.0
458	Room 458	905.0
459	Room 459	908.0
460	Room 460	910.0
461	Room 461	912.0
462	Room 462	915.0
463	Room 463	918.0
464	Room 464	920.0
465	Room 465	922.0
466	Room 466	925.0
467	Room 467	928.0
468	Room 468	930.0
469	Room 469	932.0
470	Room 470	935.0
471	Room 471	938.0
472	Room 472	940.0
473	Room 473	942.0
474	Room 474	945.0
475	Room 475	948.0
476	Room 476	950.0
477	Room 477	952.0
478	Room 478	955.0
479	Room 479	958.0
480	Room 480	960.0
481	Room 481	962.0
482	Room 482	

